


**NEVAIRUOK AUTOMOBILIO IŠGĖRES!!!
NERIZIKUOKITE!!! ISSIMATUOKITE ALKOHOLIO KIEKĮ SU CA1000**

PORTATYVINIS ALKOTESTERIS CA1000

SPECIFIKACIJA

Išmatavimai: 52x77x14mm; Svoris: 53.50g; Baterijos: 2x1.5 V AAA Alkaline; Įšilimo laikas: 20sek.; Matavimo rezultatas: per 10sek; Matavimo ciklo trukmė: 30sek.; Matavimo ribos 0.0-0.8promiles; Paklaida: ±10%.

PRIETAISO SUDĖTINĖS DALYS

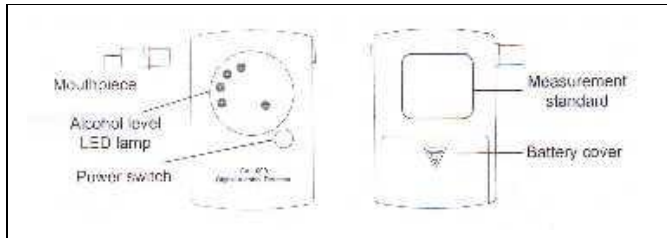

Mouthpiece - Antgalis. Alcohol level LED lamp - Alkoholio kiekio informaciniai indikatoriai. Power switch - Prietaiso įjungimo/išjungimo jungiklis. Measurement standard - Alkoholio kiekio matavimo vienetu palyginamoji lentelė. Battery cover – Baterijų dangtelis.

PRIETAISO DARBAS

- Įdedame antgalį ir įjungiamo prietaisą, paspausdami jungiklį "POWER". Po trumpo pyptelėjimo prietaisas 20 sekundžių šyla ir ruošiasi matavimui. Apie pasiruošimo eigą informuoja prietaiso indikatoriai mirksintys nuo žalios iki raudonos spalvos ir atvirkščiai.
- Išgirdus pyptelėjimą ir užsidegus žaliai lemputei prietaisas yra pasiruošęs matavimui. Lūpomis paimame antgalį ir pastoviai (vienodu srautu) pučiame iškvepiama orą, kol išgirstame du pyptelėjimus. Pūtimą reikia pradėti per 10 sekundžių nuo pyptelėjimo ir žalios lempučių užsidegimo, kitaip prietaisas automatiškai išsijungs ir matavimo procesą reikės pradėti iš naujo.
- Po įputimo žalias prietaiso indikatorius mirksi 3 sekundes. Po to prietaisas parodo matavimo rezultatą atitinkamos šviesos indikatoriumi ir pyptelėjimų skaičiumi. Indikatorius šviečia 7 sekundes. Matavimo reikšmės:
 - mažiau 0.1 promiles: žalias indikatorius ir 5 pyptelėjimai,
 - 0.1 promiles arba daugiau: pirmas geltonas indikatorius ir 7 pyptelėjimai,
 - 0,3 promiles arba daugiau: antras geltonas indikatorius ir 9 pyptelėjimai,
 - 0,5 promiles arba daugiau: pirmas raudonas indikatorius ir 16 pyptelėjimų,
 - 0:8 promiles arba daugiau: antras raudonas indikatorius ir 25 pyptelėjimai.
- Atlikus matavimą prietaisas išsijungia automatiškai.
- Kitas matavimas atliekamas kartojant procedūrą, pradedant 1 punktu.

DĖMESIO! Norint turėti tikslus matavimus reikia tarp matavimų daryti nemažesnę kaip dviejų minučių pertrauką.

ISPĖJIMAI!

- Matavimą atlikite praėjus ne mažiau kaip **20 minučių** nuo alkoholio vartojimo, valgymo ir rūkymo. Prietaisas alkoholio kiekį matuoja ore, iškvėptame iš plaučių gilumos, todėl alkoholis, maisto likučiai ir tabako durnai susikaupę seilėse gali turėti įtakos matavimo tikslumui.
- Nematuokite, esant stipriam vėjui ir neventiliuojamose patalpose.
- Nepūskite cigarečių durnų ir/arba skysčių į prietaisą, nes tai sugadins prietaiso alkoholio jutiklį. Po rūkymo į prietaisą pūskite praėjus ne mažiau kaip **2 minutėms**.
- Nors prietaisas tiksliai matuoja alkoholio kieki iškvėptame ore, tačiau tai nėra pagrindas suteikiantis teisę vairuoti išgėrus, nes vienodas alkoholio kiekis skirtingus žmones veikia skirtingai.
- Prietaisą saugokite nuo perkaitinimo ir vaikų. Prietaiso darbo temperatūra 10-40°C.
- Kad užtikrinti patikimus matavimo rezultatus, prietaiso kalibravimas atliekamas kas 6 mėnesiai. Prietaiso kalibravimą atlieka Importuotojo serviso tarnyba.

GARANTIJA

Gamintojas prietaisui suteikia 12 mėn. garantiją nuo pardavimo datos. Kalibravimas neįeina į garantinio remonto darbus. Garantija prarandama, jeigu prietaisas sugenda ne dėl gamintojo kaltės.

IMPORTUOTOJAS

EUROTERA UAB

Tilzes 20, LT-47181 Kaunas, Tel: 37 363570, mob. 8698 43753 Faks: 37 362615, eurotera@aviga.lt

PARDAVĖJAS:

/pavadinimas/ /v. pavardė/ /data/ /parašas/
A. V.